



CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA PATE CONDUCTRICE

«TEN 20»

Nos codes : G455/G456/G457

<u>PRODUIT :</u>	Pâte conductrice et adhésive pour une utilisation dans les procédures de neuromonitoring en conjonction avec des électrodes de neurodiagnostic sans gel afin d'améliorer les résultats des test.
<u>COMPOSITION :</u>	Mélange des composants suivants : polyoxyéthylène, (20), éther cétylique, eau, glycérine, carbonate de calcium, 1,2 propanediol, chlorure de potassium, blanc de gel, chlorure de sodium, sorbitol de polyoxyéthylène, méthylparabène et propylparabène.
<u>Toxicité:</u>	Aucun risque connu, non toxique à l'ingestion.
<u>CONSERVATION :</u>	Maintenir le couvercle fermé en température ambiante
<u>PRECAUTIONS</u>	Hydrosolubilité partielle, indolore. Pâte non inflammable, stable et non réactif en condition normale d'utilisation, sans risque de polymérisation. Respecter les consignes d'utilisation. Appliquer toujours la pâte sur l'électrode en portant des gants chirurgicaux ou en caoutchouc. Se laver les mains après l'application sur le patient. Ne pas utiliser sur ou à proximité d'une peau présentant une lésion. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser avec des électrodes produisant une intensité. En cas d'irritation cutanée ou d'ingestion, le signaler immédiatement au médecin En cas de contact oculaire, le signaler immédiatement au médecin et rincer abondamment les yeux avec de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes. Eviter de frotter les yeux
<u>UNITE DE VENTE :</u>	G455 : Flacon de 115g G456 : Tube de 114g G457 : Pot de 228g Conditionnement par 3

IMMED Europe

Parc d'activité de la Broye – 59710 ENNEVELIN

SARL au capital de 20 000 euros – RCS B424181931 – APE 514N – SIRET 42418193100025 – TVA FR89424181031

Tél : (0033)3 28 55 02 55 fax : (0033)3 28 55 02 58

IMMED Benelux

Avenue Winston Churchill 192B – 1180 BRUXELLES

TVA BE4669086 RC Bruxelles 637827

Tél : (0032)2 381.15.55 fax : (0032)2 381.15.61



Informations complémentaires

Une bouteille de ouverte, refermée correctement avec le capuchon, peut être utilisée jusque la date de péremption.

Si ce capuchon n'est pas repositionné correctement, le gel peut sécher car il entre en contact avec l'air, ce qui ne doit pas se produire.

IMMED Europe

Parc d'activité de la Broye – 59710 ENNEVELIN

SARL au capital de 20 000 euros – RCS B424181931 – APE 514N – SIRET 42418193100025 – TVA FR89424181031

Tél : (0033)3 28 55 02 55 fax : (0033)3 28 55 02 58



Avenue Winston Churchill 192B – 1180 BRUXELLES
TVA BE4669086 RC Bruxelles 637827
Tél : (0032)2 381.15.55 fax : (0032)2 381.15.61